

Кушетка массажная Стандарт

1. Технические характеристики

- 1.1. Габаритные размеры (высота, ширина, длина) 730, 700, 2000мм.
- 1.2. Допускаемая нагрузка (не более):
140кг на лежак; 20кг на подлокотники; 30кг на подголовник;
- 1.3. Масса изделия не более 40кг.
- 1.4. Материалы, входящие в состав изделия: металл, фанера, поролон, искусственная кожа, спанбонд.
- 1.5. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +5 до +30 °C и относительной влажности воздуха 60-70%.
- 1.6. Срок службы изделия - 5 лет.

2. Комплектация

Обозначение	Наименование детали	Кол-во, шт	Примечание
Мягкие детали			
	Лежак	1	
	Подголовник	1	
	Подлокотники	2	
Каркасные детали			
	Стойки	2	
	Траверса	1	
	Ригель	1	
	Рамка подголовника	1	
	Рамки подлокотников	2	
	Опора регулируемая	4	
	Вставка в рамку подлокотников	2	
	Барашки	2	Для фиксации рамки подлокотников
Крепежные изделия			
	Болт м 8x40	8	Под крепление ригеля, рамки подголовника и траверсы к стойкам каркаса
	Саморез пресс м6x40	6	Под крепление рамы каркаса к лежку
	Саморез м 4x30	16	Под крепление подлокотников и подголовника к каркасу
	Шайба м 8	8	

4. Меры безопасности

использовать кресло только по прямому назначению, не допуская превышения нагрузок указанных в п. 1.2.

5. Гарантийные обязательства

изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения, и эксплуатации.

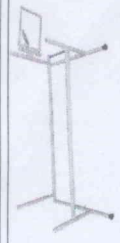
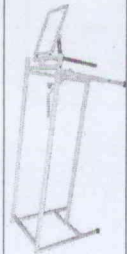
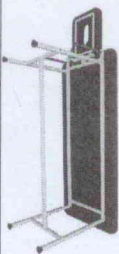
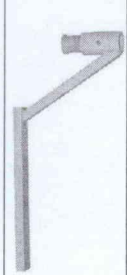
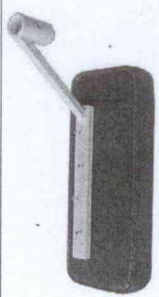
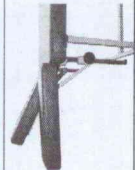
За механические повреждения мягких элементов кресел полученные в процессе эксплуатации(порезы, вмятины, потёртости, пятна от воздействия агрессивных химических веществ) данная гарантия не распространяется.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи.

Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить настоящий паспорт с подписью продавца, либо торгующей организации или настоящий паспорт и товарно-транспортную накладную.

Гарантийное обслуживание производится по адресу

скава, ул. Электрозаводская д.29, стр. 2, офис 407Г инд: 107076, тел: (495) 642-86-62, (495) 988-76-60
service@group-hitek.ru

1	Устанавливаем опоры на рамы каркаса, траверсу, ригель и рамку подголовника на одну из рам. Крепим их с помощью болтов м 8x40 и шайб м8	
2	Прикрепляем вторую раму каркаса	
3	Укладываем каркас в сборе на мягкие элементы	
4	Прикрепляем каркас к лежку саморезами м 6x40 а подголовник м 4x30	
5	Вставляем пластиковые вставки в рамки подлокотников	
6	Прикрепляем рамку подлокотников к подлокотникам с помощью саморезов м 4x30	
7	Вставляем рамки подлокотников в каркас и закрепляем с помощью барашков	
8	Кушетка в сборе	