

Стерилизатор сухожаровой для обработки инструментов WILSON PS-3401

Руководство по эксплуатации Только для профессионального использования!

Прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Назначение:	Стерилизатор предназначен для стерилизации маникюрных и педикюрных инструментов. Рекомендуется использовать в салонах красоты и в домашних условиях.
Описание:	Компактный стерилизатор сухожаровой WILSON PS-3401, оборудован съёмной металлической ёмкостью и двумя ручками для безопасного извлечения инструментов. Внутренняя поверхность изготовлена из нержавеющей стали. Для удобства перемещения стерилизатора предусмотрены деревянные ручки.
Технические характеристики:	<ul style="list-style-type: none">➤ Напряжение 220-240 В; 50 Гц➤ Размер: 350x190x180 мм➤ Размер внутренней камеры: 250x125x55 мм➤ Объём камеры: 1,7л.➤ Мощность: 300 Вт➤ Температура нагревания: от 0 до 200 °С➤ Таймер: от 0 до 60 мин.➤ Прибор снабжён автоматической системой поддержания температуры
Порядок эксплуатации:	<ol style="list-style-type: none">1. Поставьте прибор на ровную устойчивую поверхность, вдали от легковоспламеняющихся предметов и жидкостей.2. Поместите инструменты в стерилизатор и закройте плотно крышку.3. Подключите прибор к электросети.4. С помощью регулятора температуры (расположен, с левой стороны прибора) выберите нужную температуру.5. После выбора температуры, поверните регулятор таймера для выбора времени стерилизации.6. На передней панели прибора загорятся зелёный и красный индикаторы.7. Красный индикатор обозначает, что прибор работает.8. После достижения необходимой температуры во внутренней камере стерилизатора, зелёный индикатор должен погаснуть и загореться в автоматическом режиме, когда температура начнёт снижаться (так как стерилизатор в течении установленного времени работает в режиме поддержки выбранной температуры).9. После окончания стерилизации прозвучит звуковой сигнал.10. Для извлечения обработанных инструментов во избежание ожогов используйте специальные ручки которые входят в комплектацию.
Меры предосторожности/ Рекомендации/ Условия хранения:	<ul style="list-style-type: none">➤ Помещение, в котором будет размещён стерилизатор, должно быть проветриваемым.➤ Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению питания прибора. В противном случае может произойти замыкание.➤ Перед стерилизацией убедитесь, что инструменты сухие и чистые.➤ Рекомендуется использовать пакеты для стерилизации.➤ Нельзя вынимать инструменты, не дав им остыть в самом стерилизаторе.➤ Не храните и не используйте стерилизатор в местах с повышенной влажностью. Не помещайте в воду или какую-либо другую жидкость. Если прибор упал в воду или намок, не прикасайтесь к воде и устройству – немедленно отключите от электросети.➤ Не накрывайте прибор тканями во избежание воспламенения.➤ Рекомендуется стерилизовать при температуре от 180°С до 200°С в течении 60 мин, не допуская превышения этого значения, в результате чего можно избежать воздействия высокой температуры, понижающей твёрдость металла. Даже при кратковременном превышении рекомендуемой температуры от 180°С до 200°С снижается прочность инструмента.➤ Не оставляйте включенный аппарат без присмотра. Запрещается использовать и хранить аппарат в месте, доступном для детей.

Внимание! Высокое напряжение! Разбирать прибор категорически запрещается. При нарушении данного условия гарантия аннулируется. В случае поломки обращайтесь в по месту покупки прибора.

Производитель: Guangzhou Yorkma Electrical Company, Адрес: No.7, Shiding Road, Yahu Village, Rene Town, Baiyun Dist., Guangzhou, Guangdong, China (Mainland).

Товар сертифицирован